


【便中ヘモグロビン(ラテックス):図1】

- 1) 専用採便管から採便スティックの付いているキャップを取り外してください。
- 2) 採便スティックで便の表面を幅広く擦って採取するか、または5～6カ所を突き刺して採便スティックの先端に便を取ってください。便の量は、先端の溝が埋まるくらいが適量です。
- 3) 容器に採便スティックを戻し、キャップをしっかりと閉めて容器を数回強く振ってください（しっかりと閉まった状態でも、容器とキャップの間にはわずかな隙間があきます）。
- 4) 採便後、測定までの間、なるべく緑色のキャップを下側にしておいてください。

図1

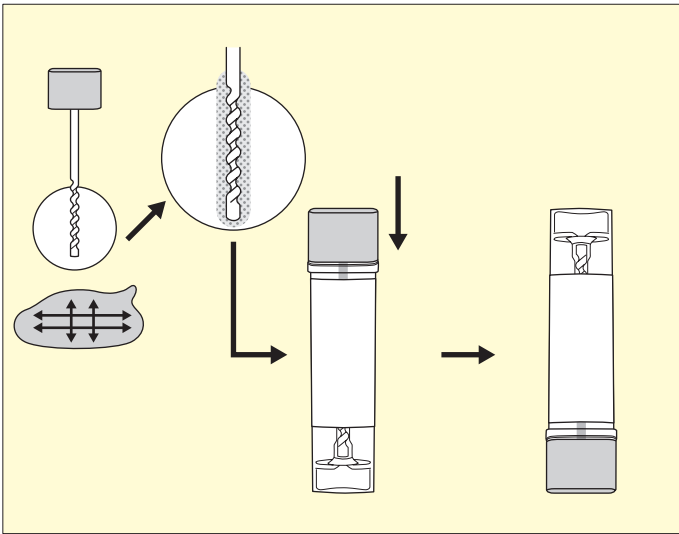

【糞便アメーバ検査:図2】

- 1) 専用容器のキャップを取り外し、市販の10%ホルマリンを10mL入れてください。
 - 2) 付属のスプーンを使って、新鮮な便は山盛り1杯、保存便は2杯を容器に入れてください。
 - 3) スプーンでよくかきまぜた後、内容物がこぼれないようにしっかりとキャップをしてください。
 - 4) 軟便、水様便で原虫を疑う場合、日を変えての連続検査をお勧めします。
- ※ 血便疑いまたは血便材料の際は、(容器番号29)と(容器番号60)の両方の容器でご提出ください((容器番号60)を使用するとホルマリンの影響により検体が固まり検査不能となる場合があります)。

図2

